

Checklista för hjärtstartare

Den här checklistan är avsedd att användas till alla hjärtstartare oavsett modell. Tänk på att alltid följa tillverkarens rekommendationer.

Kontrollpunkter för hjärtstartare

Statusindikator

Kontrollera elektroder

Tillbehör

Skylt

Registrerad i hjärtstartarregistret



Statusindikator

Kontrollera att statusindikatorn visar att hjärtstartare är ok, statusindikatorer kan vara såväl lampa, display eller något annat som visar om hjärtstartaren fungerar eller inte.

Elektroder

Kontrollera att elektroderna sista förbrukningsdatum inte har passerat och att förpackningen hel och obruten.

Tillbehör

Kontrollera att det finns sax, rakhyvel, stor kompress eller liten handduk, ansiktsskydd, skyddshandskar tillsammans med hjärtstartare.

Skylt

Kontrollera att lokalen/platsen är väl skyltade att det är lätt att hitta hjärtstartare i den händelse den skulle behövas.

Sveriges hjärtstartarregister

Är hjärtstartaren registrerad på www.hjartstartarregistret.se? Säkerställ att alla uppgifter är korrekta. Använd gärna en mailadress som inte är knuten till person för viktig information från hjärtstartarregistret.